

ディマスティック  
DIMASTICの管理方法

マットレスカバーは感染予防対策のリスクから考えると、傷のない正常な皮膚の触れる「低リスク」で、通常は、清拭・乾燥の扱いとなります。

ただし、血液・体液・排泄物等の付着した場合は、消毒の対照となります。

見た目に綺麗に湿式清拭し乾燥後直ちに使用が可能です。

具体的には、

1. 微温湯（30～40）又は、温湯（60～70）に湿らせたクロスで清拭します。
2. 洗剤を使用する場合は、環境保全のため生分解性の高いものを使用してください。  
(例) エコクリーン(ユーホーケミカル社製 生分解性 98.8%)  
100倍希釈液を汚れの部分に塗布後、1分以上時間をおいて汚染等が除去しやすくなってから清拭してください。除去できたら再度微温湯又は、温湯で洗剤を除去してください。乾燥させると撥水機能が発揮されます。
3. 血液・体液・排泄物等が付着した場合の処置方法  
ゴム手袋着用  
次亜塩素酸ナトリウム液 0.1～0.5% (1000～5000ppm)  
を使用して消毒をしてください。  
更に中性洗剤で清拭後、微温湯又は、温湯による清拭を行い乾燥させてください。  
拭き取ったクロスは熱湯・温湯又は次亜塩素酸ナトリウム液で消毒処置をしてください。
4. 洗濯する場合、微温湯又は、50～60の温湯と洗剤を使用して洗濯してください。  
1・2類感染症等の使用時は、80 10分以上の洗濯が必要ですが、頻繁な高温洗濯は、本品に影響を受けますので注意が必要です。
5. 本マットレスカバー (DIMASTIC) は、防水性で、蒸れにくい特徴を持っています。更に、その場で清拭により衛生的な処置ができるところにメリットがあります。特に汚れが除去しやすいように撥水性と汚加工が施してあります。汚れの取れやすさを多忙な医療業務に活用してください。



(株)メディカル・マネジメント・サポート  
〒441-8057 愛知県豊橋市柱七番町 101  
TEL 0532-48-9370 FAX 0532-48-6362  
Info@m-m-s.co.jp  
<http://www.m-m-s.co.jp>