

# ディスポーザブルネオプラスチックグローブ

Disposable NeoPlastic Gloves



## ディスポーザブルネオプラスチックグローブを使用してください

標準予防策の考えに基づき、湿性の血液・体液・排泄物等に触れる可能性のある時に使用します。

- 使用目的に合った手袋を判断し使用します。未滅菌手袋は主に中間リスク以下の処置時に使用します。
- 手袋を患者の目の前で箱から出してすぐ装着します。
- 手袋を使用することにより患者間の交差感染を予防します。
- 手袋を使用することにより医療従事者の感染予防に役立ちます。
- フィットするサイズを選んで使用してください。
- 医療用の手袋は単回使用です。

## ディスポーザブルネオプラスチックグローブの特徴

- フィット感が良好で操作性に優れる
- パウダーフリー
- ラテックス手袋と同等の強度
- ラテックスアレルギーの心配がない
- 経済的

本製品は、通常の医療における比較的短時間の診療用に使用されるディスポーザブル手袋です。検査室等で連続的に機械操作をする場合は強度上指先が破れる場合があります。このような作業にはニトリル製の手袋を使用してください。(本製品は、医療用です。調理、食品加工には使用できません。)



こんな時に手袋(ディスポーザブルプラスチックグローブ)を使用します

標準予防策

すべての患者の目視できる湿性の血液・体液・排泄物等は病原体が未同定で、感染の可能性があるものとして取り扱います。

手袋を必要とする処置と交換の目安

処置等		必ず	必ずしも必要ない	交換の目安
採血	●真空採血管へ直接採血		○	—
	●注射器で採血し、ふたを開けて採血管に移す	○		汚染時
	●Aライン採血	○		患者ごと
注射	●筋肉注射、皮下注射、静脈内注射		○	—
	●プラスチック外筒付き留置針の留置	○		患者ごと
各種処置	●創の処置 ●口腔ケア ●痰吸引(鼻腔・口腔・気管切開)	○		患者ごと
	●尿道留置カテーテルの処置時 ●IVH留置カテーテルの処置時	○		患者ごと
	●粘膜に触れる時 ●ストーマに触れる時	○		患者ごと
	●採尿バッグの取扱い	○		連続操作でも1回ごと
	●各種ドレーンからの廃液・吸引物の取扱い ●感染性リネンの取扱い	○		1回ごと
排泄	●失禁後の処置、おむつ交換	○		患者ごと
	●便器を設置するだけ		○	—
	●排泄物に触れる可能性があるとき	○		1回ごと
清掃	●感染源隔離の最終処理時 ●こぼれた、又は飛散した血液・体液・排泄物等の処理時	○		1回ごと

©ICHG研究会2002

手袋の着け方・外し方

着け方



1 利き手で小範囲につまんで取り出す。




2 反対の手で手首の部分を持ち替え、親指の位置を確認し、何処にも触れないように利き手に装着する。



3 利き手に装着した手袋で、もう片方の手袋をつまんで取り出す。このとき、箱から出過ぎた手袋は、手袋をした利き手で、次の人が使いやすいように押し込む。



4 手首の部分を持ち替え、親指の位置を確認する。

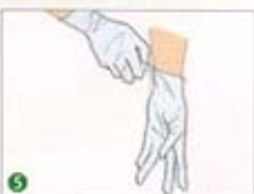

5 同様に装着する。

外し方



1 利き手で一方の手袋の袖口から3cmの部分をつかむ。



2 汚染された手袋の外側が内側になるように指を折った状態で親指をぬく。



3 折った指をのばし、手袋を利き手の手袋の中に入れて握る。



4 手袋を外した手で利き手の手袋の外側に触れないように袖口に差し入れ、袖口の内側をつかむ。



5 手袋をしている利き手を垂直に下ろすと、片方の手袋が中に入った状態で手袋が外れる。

※本製品はクリーム色です。  
※指先がフィットしない場合は、1ランク小さいサイズをご使用ください。

©ICHG研究会2004



手袋を外したら必ず手を洗い、洗った手を乾燥させましょう。

- ・汗で手袋内での微生物の増殖の可能性があります。
- ・手袋にピンホールの可能性があります。
- ・手袋を外す時に、血液・体液・排泄物等が手に付着する可能性があります。(手に汗をかいて濡っている場合は、物に触れるたびに微生物がどんどん移動していくので注意してください。)

規格

製品名	ディスポーザブルネオプラスチックグローブ			
製品コード	425447	425454	425461	425478
サイズ	SS	S	M	L
材質	強度PVC			
箱サイズ	245mm × 125mm × 70mm			
カートンサイズ	390mm × 260mm × 265mm			
入数	1ヶ箱	100枚入		
	カートン	100枚/箱 × 10箱		

※本製品はICHG研究会の協力により作製されました。

発売元

代理店

株式会社長谷川總行  
〒481-0013  
愛知県西春日井郡師勝町大字二子字四反地977-2  
TEL.0568-26-6621 FAX.0568-26-7731  
URL: <http://www.hasemen.co.jp/>



株式会社メディカル・マネジメント・サポート  
愛知県豊橋市柱七番町101 〒441-8057  
TEL.0532-48-9370 FAX.0532-48-6382  
E-mail: [info@m-m-s.co.jp](mailto:info@m-m-s.co.jp)  
URL: <http://www.m-m-s.co.jp>