

ディスポーザブルサージカルマスク

Disposable Surgical Mask




● ディスポーザブルサージカルマスクを使用してください。

標準予防策の具体策の1つとして使用します。

● サージカルマスクは、飛沫の飛散防止又は、口と鼻を飛沫等から防御する目的で使用します。

● ディスポーザブルサージカルマスクの特徴

- PPスパンボンド不織布(外側) + PPメルトブロー不織布(帯電フィルター)(中間) + PPスパンボンド不織布(口側)の3層構造です。(PP:ポリプロピレン)
- マスク上部の金具(鉄芯+PPカバー)が通常より長く、鼻と顔の形に合わせ易くなっています。
- ウーリーゴムはやわらかく、長時間の装着に対応可能です。
- バクテリア捕集効率(BFE)試験は平均99.3%です。
[平均粒子径サイズ:約2.7~3.0 μ m 試験菌:黄色ブドウ球菌]
- 微粒子ろ過効率(PFE)試験は平均98.8%です。
[粒径:0.1 μ m(0.102 \pm 0.003 μ m)]
- 本マスクは水分を透過させません。
- フタはミシン目から切り取ることが可能です。

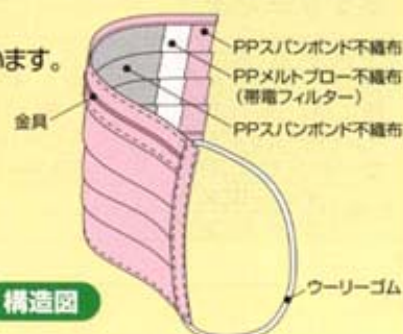

なぜガーゼマスクよりサージカルマスクなのか?

ガーゼマスク等の水分を透過させるマスクは、外側に飛沫を浴びた場合、ガーゼに吸着され内側の部分が汚染を受け、かえって危険な場合があります。本サージカルマスクは、水分を透過させないので、飛沫を完全に遮断することができます。また、本サージカルマスクを呼吸器疾患の患者に装着してもらえば、咳をしたとき飛沫の飛散をほぼ完全に抑えられ、飛沫核の発生もないので感染予防対策上有効です。

● **こんな時にはディスポーザブルサージカルマスクを使用します。**

標準予防策

すべての患者の目視できる湿性の血液・体液・排泄物等は病原体が未同定で、感染の可能性があるものとして取り扱います。

	主にサージカルマスクを装着する時	具体的使用法の一例
医療従事者	無菌操作時	手術時、IVH装着時、カテーテル装着時等
	清潔操作時	調乳時、調剤時
	血液・体液・排泄物等の飛散の可能性があるとき	呼吸器疾患の診察時、検査時
その他	消毒剤・洗浄剤等の化学物質の飛散の可能性があるとき	器具・器機洗浄時、塗料等の塗布時（ゴーグル等とともに使用）
	咳のでる患者の飛沫発生予防時	呼吸器疾患患者の飛沫発生防止時
	人ごみでの感染予防時	インフルエンザ流行時

ICHG研究会資料より転載

● **ディスポーザブルサージカルマスクの着方（ゴムひもタイプ）**




① マスクを取り出し、表裏を確認します。表裏の見分け方は金具を上にし、蛇腹が下向きになっているほうが表側です。

② マスクの上部に金具が装着してあります。ゴムひもを耳にかけ、金具を自分の鼻の形にあわせて曲げます。

③ マスクの蛇腹を下へ引くと広がりますので、十分に鼻・口に密着させて覆うことができます。



マスクを着用すると医療者の顔が隠れ患者に疎外感を与えやすくなることから、マスクは必要なときにのみ着用してください。小児病院等では、患児のために笑顔で対応することが望まれます。医療現場においては、紙マスク、ガーゼマスクは、水分を透過させ飛沫が口元に染みるなどの問題があるため使用しないでください。

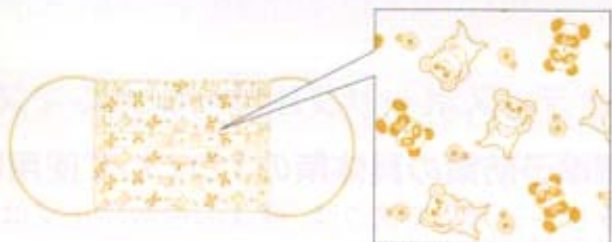

※小サイズマスクは図柄入りです。

■規格

製品名	ディスポーザブルサージカルマスク						
	PPSノンボンド不織布 PPメルトブロー不織布(帯電フィルター)						
マスクタイプ	ゴムひもタイプ					ひもタイプ	
マスクサイズ	普通サイズ		中サイズ	小サイズ	普通サイズ		
	175×90mm		145×90mm	120×90mm	175×90mm		
マスクカラー	ピンク	ブルー	ホワイト	ホワイト	図柄入	グリーン	ブルー
製品コード	433602	433619	433626	433633	433640	433664	433671
箱サイズ	185×100×90mm			155×100×90mm	130×100×90mm	190×100×120mm	
インナーBOXサイズ	510×195×190mm			510×165×190mm	510×140×190mm	515×195×250mm	
カートンサイズ	530×410×210mm			530×350×210mm	530×300×210mm	530×420×270mm	
入数	50枚/箱×10箱						
	50枚/箱×10箱×2Box						

※本製品はICHG研究会の協力により作製致しました。

発売元

代理店

株式会社長谷川總行

〒481-0013

愛知県西春日井郡勝町大字二子字四反地977-2

TEL.0568-26-6621 FAX.0568-26-7731

URL <http://www.hasemen.co.jp/>



株式会社メディカル・マネジメント・サポート

愛知県豊橋市柱七番町101 〒441-8057

TEL.0532-48-9370 FAX.0532-48-8362

E-mail: info@m-m-s.co.jp

URL: <http://www.m-m-s.co.jp>